

# COVID-19

## RECUPERATION, DESINFECTION D'UN DISPOSITIF MEDICAL

**EPI**

L'épidémie de COVID-19 est entrée dans une nouvelle phase sur le territoire national. Le passage en stade 3, annoncé le 14 mars 2020, correspond à la diffusion sur le territoire du SARS-CoV-2 et à la bascule de la prise en charge des formes bénignes de l'hôpital vers la médecine de ville.

La Société Française d'Hygiène Hospitalière a émis plusieurs recommandations visant la prévention de la transmission croisée et du risque épidémique par la mise en place de précautions complémentaires de type « air » et « contact ».

### Livraison – Récupération

Pour assurer leur propre protection ainsi que celle des patients, les personnels intervenants au domicile doivent être équipé :

- De gants non stériles à UU<sup>1</sup>,
- D'un masque de protection respiratoire de type FFP2<sup>2</sup>,
- D'une surblouse à UU.

Une hygiène des mains avant et après le port des gants est également recommandée  
(voir fiche 021 du référentiel Winnicare Services).

Dans le cas de la récupération d'un dispositif médical au domicile ou en collectivité, les recommandations suivantes doivent être appliquées :

- Equiper les personnels (*en particulier pour la récupération des matelas et autres textiles*) avec port d'une surblouse à UU, de gants non stériles à UU, de lunettes de protection et d'un masque de protection respiratoire de type FFP2.
- Respecter les éléments suivants pour la récupération des matelas :
  - Ne pas secouer le linge,
  - Dégonfler le matelas à l'aide d'une pompe rapide pour limiter au maximum les manipulations. Diriger la sortie d'air de la pompe rapide vers l'extérieur (*ouverture de la fenêtre de la chambre*) pour réduire à minima la contamination de l'air de la pièce,
  - Appliquer un désinfectant de surface conforme à la norme EN 14476+A2<sup>3</sup> sur le matelas et le compresseur,
  - Rouler le matelas et le mettre dans son sac de transport,
  - Stocker 24 heures le dispositif complet avant d'appliquer le procédé de nettoyage et de désinfection de toutes les parties du produit.

<sup>1</sup> Usage Unique

<sup>2</sup> La politique de distribution des masques aux professionnels de santé libéraux se fait via les officines

<sup>3</sup> Antiseptiques et désinfectants chimiques. Virucidie en conditions de propreté.

## Nettoyage – Désinfection

### **Matelas à air :**

- Mettre l'enveloppe externe du matelas (*housse supérieure + base*) ainsi que le sac de transport en machine à laver.
- Laver avec un cycle à 60 degrés pendant 30 min au minimum.
- Nettoyer et désinfecter les autres surfaces du matelas (*vanne CPR, connecteur, cellules, compresseur ...*) avec un des procédés suivants :
  - Bionettoyage suivi d'une désinfection de surface avec un produit désinfectant validé par la norme EN 14476+A2<sup>4</sup> (*activité virucide*) ou avec une solution d'eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (*1 litre de Javel à 2,6% + 4 l d'eau froide*). Voir la fiche 036 du référentiel Winncare Services,
  - Système vapeur type Sanivap<sup>®</sup>. Voir la fiche 035 du référentiel Winncare Services.

### **Dispositif médical en mousse (matelas, coussin) :**

Deux cas sont à considérer :

- « Cas confirmé » (*diagnostic d'infection à SARS-CoV-2*) :  
Éliminer le dispositif médical dans une filière DASRI à la sortie du patient atteint par la maladie du Covid-19.
- « Cas suspect ou possible » (*non diagnostiqué d'infection à SARS-CoV-2*) :
  - Procéder à un bionettoyage avec une désinfection de surface au moyen d'un produit désinfectant répondant à la norme EN 14476+A2 (*activité virucide*) ou avec une solution d'eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (*1 litre de Javel à 2,6% + 4 l d'eau froide*). Voir la fiche 036 du référentiel Winncare Services. Laisser ensuite le dispositif 24 heures dans un lieu de stockage avant toute réutilisation.

OU

  - Procéder au lavage de l'enveloppe externe du dispositif médical en machine à laver avec un cycle à 60 degrés pendant 30 minutes minimum. Laisser ensuite le dispositif 24 heures dans un lieu de stockage avant toute réutilisation.

### **Lits médicaux, lève-personnes :**

- Nettoyer et désinfecter toutes les surfaces du dispositif (*télécommande, barrières, sommier, panneaux, structure...*) avec un des procédés suivants :
  - Bionettoyage suivi d'une désinfection de surface avec un produit désinfectant validé par la norme EN 14476+A2 (*activité virucide*) ou avec une solution d'eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (*1 litre de Javel à 2,6% + 4 l d'eau froide*). Voir la fiche 036 du référentiel Winncare Services,
  - Système vapeur type Sanivap<sup>®</sup>. Voir la fiche 035 du référentiel Winncare Services,
- Les sangles des lève-personnes doivent être lavées en machine avec un cycle à 60 degrés pendant 30 min au minimum.

Les EPI<sup>5</sup> seront déposés après usage dans un sac étanche qui sera éliminé par une filière industrielle spécifique sans manipulation.

**Ces recommandations sont élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date d'édition de ce document. Elles sont susceptibles d'évoluer en fonction du niveau de connaissance sur ce nouveau virus.**

<sup>4</sup> Antiseptiques et désinfectants chimiques. Virucidie en conditions de propreté.

<sup>5</sup> Equipements de Protection Individuelle