




Support à air motorisé  
à pression alternée



## I EFFICACITÉ THÉRAPEUTIQUE<sup>1</sup>

INSCRIT  
À LA LPP

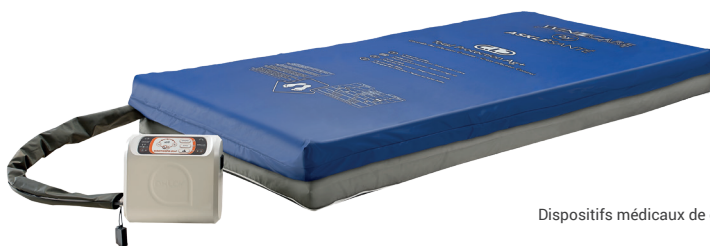

Dispositifs médicaux de classe I  

DISPOSITIF D'AIDE à la prévention d'escarre(s) pour patient à risque **moyen à élevé**  
et au traitement d'escarre(s) constituée(s) de **stade 1 à 4**  
POUR UTILISATEUR JUSQU' à **165 KG**


Modalités de prescription : dans les indications d'aide au traitement de l'escarre, l'association aux dispositifs de décharge localisée ou de positionnement est obligatoire

Document destiné aux professionnels

<sup>1</sup> Meaume S, Rousseaux C, Marty M. Incidence of pressure ulcer in patients using an alternating pressure mattress overlay: the ACTIVE study. J Wound Care. 2021 Feb 2;30(2):143-149. DOI: 10.12968/jowc.2021.30.2.143.



axtar automorpho<sup>®</sup>  
plus

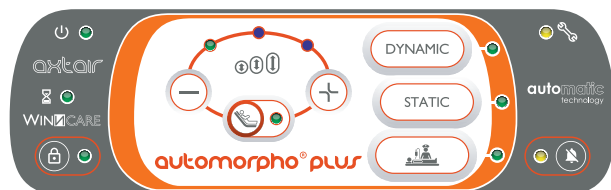

- ▶ Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- ▶ Décharges talonnières intégrées
- ▶ 3 modes de fonctionnement : dynamique, statique basse pression, soins
- ▶ Réglages confort quelque soit le mode utilisé et la position du patient au lit
- ▶ 3 largeurs disponibles : 90, 100 et 120 cm
- ▶ Gestion de la maintenance, Programme Aircare



AIRCARE

## ▶ À domicile, un nombre important de personnes âgées en perte d'autonomie<sup>1</sup>

1,5 millions

de personnes âgées de 60 ans et plus

83 ans

patients à risque d'escarres

700 000

patients à risque d'escarres<sup>2</sup>

## ▶ ...et porteuses d'escarre(s)<sup>3</sup>

130 000

patients porteurs d'escarre(s)

## ▶ Des proches aidants de moins en moins nombreux<sup>4</sup>

55 ans

Âge moyen des proches aidants (40 < 75 ans)

75 %

Déclarent fatigue et stress dus à leur rôle d'aidant

### Sources

<sup>1</sup> Carrère A. Vivre à domicile ou en institution : quels sont les déterminants de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées ? Regards 2020/1 (N° 57), p127-139.

<https://www.cairn.info/revue-regards-2020-1-page-127.htm>

<sup>2</sup> HAS. population cible de l'ensemble des support d'aide à la prévention et d'aide au traitement des escarres à domicile est estimée dans une fourchette large comprise entre 470 000 et 1220 000 patients.

<sup>3</sup> Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses: propositions de l'assurance maladie pour 2014. Rapport au ministre chargé de la sécurité sociale et au parlement sur l'évolution des charges et produits de l'assurance maladie au titre de 2014 (Loi du 13 août 2004), 11 juillet 2013

<sup>4</sup> OCIRP. Les chiffres-clés sur les aidants en France. <https://www.ocirp.fr/actualites/les-chiffres-clés-sur-les-aidants-en-france> (consulté le 27/09/19)

CODE LPP	DÉSIGNATION (libellé court)	TARIF en € TTC avec PLV*
1282740	Surmatelas à air motorisé AXTAIR AUTOMORPHO PLUS avec compresseur, forfait location hebdo. Date de fin de prise en charge 15 juin 2025.	10,88

Références **Axtair Automorpho Plus** prises en charge : **VAXT4/AUTO-P, VAXT4/AUTO100-P, VAXT4/AUTO120-P, VAXT4/CIC-P, VAXT4/CIC100-P, VAXT4/CIC120-P.**

## Indications<sup>1</sup>

- Prévention et aide au traitement d'escarre(s) constituée(s) de stade 1 à 4<sup>2</sup>.
- Pour des patients levés dans la journée, alités plus de 15 heures et présentant un risque d'escarre(s) « moyen » à « élevé » évalué selon une échelle validée et le jugement clinique.
- Poids patient : 30 à 165 kg.
- **Modalités de prescription et d'utilisation :**  
Dans les indications d'aides au traitement d'escarre, **l'association de dispositifs de décharge localisée et/ou de positionnement est obligatoire**, associée à l'intervention d'auxiliaires médicaux pour vérification de l'installation et réalisation de retournements.

## Contre-indications

- Patient non levé dans la journée, en mauvais état général et/ou ayant une artériopathie et/ou un trouble neurologique récent.
- Post-chirurgie d'escarre pendant les 3 mois qui suivent l'intervention.
- Patient dont le poids est supérieur à 165 Kg.
- Utilisation en caisson hyperbare.
- Utilisation sur brancard.

## Mise en garde

- La prise en charge globale de la personne à risque d'escarre doit aussi considérer les autres bonnes pratiques à fort impact pour la maîtrise du risque d'escarre (changements de positions, l'alimentation, l'hydratation, l'observation cutanée,...).

\* Prix Limite de Vente ou tarif unitaire réglementé


Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE – DM de classe 1



<sup>1</sup> Arrêté du 25 mai 2020 portant inscription du surmatelas à air motorisé AXTAIR AUTOMORPHO PLUS de la société WINNCARE France au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Accessible à : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041914864>

<sup>2</sup> Haute autorité de santé (HAS).

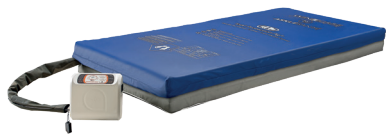

## › Support à air motorisé à pression alternée

Risque d'escarre selon jugement clinique et échelle validée


Présence d'une ou plusieurs escarres

- ▶ 3 changements de position minimum par jour par un auxiliaire médical




## › Lit médical avec 2 ou 3 fonctions électriques

- ▶ Privilégier la position « Semi-Fowler » (Relève buste à 30° / Relève jambe à 20/10°)
- ▶ Changer de position dans la journée

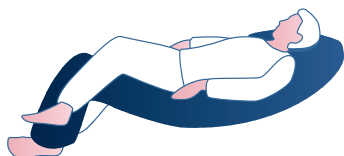

## › Aides techniques à la posture


- ▶ Dispositif de décharge
- ▶ Système de positionnement

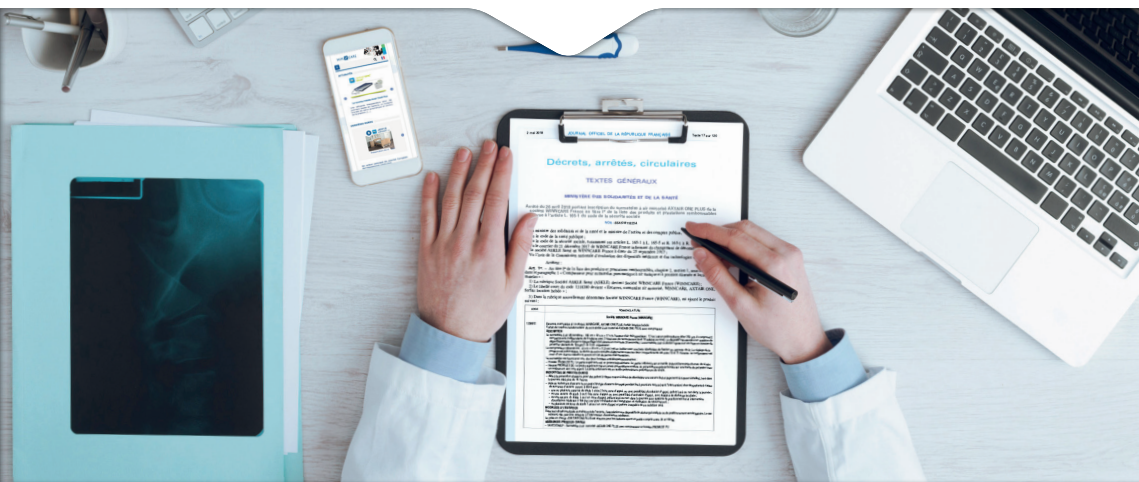

# LES DISPOSITIFS D'AIDE TECHNIQUE À LA POSTURE



## POSTURA

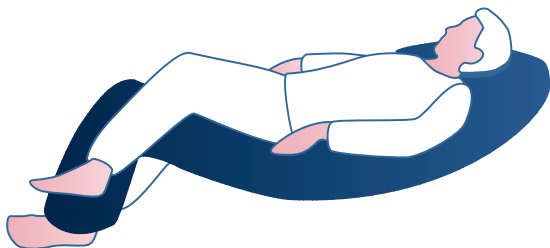

Dispositifs médicaux de classe 1  

Les aides techniques à la posture pour patients polyhandicapés permettent, en position allongée, d'assurer la mise en place simple et rapide d'un maintien postural des membres inférieures dans le but de **soutenir** et/ou **corriger** et/ou **prévenir** les postures vicieuses et d'aider à la prévention ou au traitement d'une escarre par réduction de la pression et des forces de cisaillement exercée sur la peau dans les zones à risque d'escarre.

› Coussin de série de positionnement standard doit être prescrit **SEUL**



### PRESCRIPTION

Mr ou Mme X présente des troubles posturaux en position allongée. Son état nécessite la délivrance d'un coussin de série de positionnement **STANDARD**, des hanches et des genoux.

Référence produit : VCP07CIC, VCP08CIC, VCP09CIC, VCP11CIC.

Code LPP : 6229732 / Tarif TTC : 173,79€

› Coussin **BASE** doit être prescrit avec au moins un **PLOT**



### PRESCRIPTION

Mr ou Mme X présente des déformations orthopédiques asymétriques ou symétriques des membres inférieurs. Son état nécessite la délivrance d'un coussin de série de positionnement **MODULAIRE**, des hanches et des genoux, **BASE**.

Référence produit : VCP02CIC, VCP03CIC, VCP04CIC.

Code LPP : 6229749/ Tarif TTC : 129,58€

› **PLOTS** devant être prescrits avec une **BASE**, maximum **4 PLOTS** par prescription



### PRESCRIPTION

Mr ou Mme X présente des instabilités posturales en position allongée avec coussin modulaire. Son état nécessite la délivrance d'un coussin de série de positionnement **MODULAIRE**, des hanches et des genoux, **PLOT**.

Référence produit : VCP01CIC, VCP05CIC, VCP12CIC.

Code LPP : 6229755/ Tarif TTC : 41,16€

# EXEMPLE ORDONNANCE DOMICILE

Docteur Lorem IPSUM  
134 Euphratensis discrevimus  
34850 Samosata-dictum  
Tél: + 31 (0)7 85 02 10 64  
Lorem-ipsu@Lorem Ipsum.fr

SPECIMEN

15 Mai 2022

**Mademoiselle Sylvie DUPOND**

**Braden** < 15 ; alité plus de 15h/jour ; levé au moins 1 fois/jour ; escarre de stade 3 au sacrum.

**1/ Surmatelas à air motorisé automatique **Axtair Automorpho Plus** avec compresseur à la location.**

▸ Code LPP 1282740

**2/ Dispositif de positionnement **Postura** Référence VCP08CIC.**

▸ Code LPP 6229732

**3/ Forfait de location hebdomadaire d'un lit médical 3 fonctions avec barrières.**

▸ Code LPP 1241763

**4/ Forfait de livraison du lit et accessoires.**

▸ Code LPP 1274047



Document destiné aux professionnels de santé.



#### Attention

La mise à disposition d'un matelas de prévention des escarres ne dispense pas des autres soins de traitement et/ou de prévention.



WINNOCARE FRANCE - 4 le passage du chateau 85470 Saint Paul Mont Pénit  
Site de production : 200 Rue Charles Tellier, 30000 Nîmes

WIN  CARE