

CLINIQUE

COUSSINS EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE **ALOVA[®] GALBÉ**

METHODE

- Etude observationnelle, prospective, multicentrique avec analyse descriptive
- Etude menée en **1999** en établissement de santé ; 2 suivis à J0 et J15
- **60** patients pluri pathologiques principalement neurologiques et traumatologiques
- Âge moyen 83,4 ans ; sex-ratio F/H 4 ; poids moyen 56,5 kg ; taille moyenne : 1,61 m
- Ancienneté moyenne des patients dans le service : 2,3 mois (0 ; 44)
- Score de Waterlow initial moyen : $19,8 \pm 5.4$ (10 ; 37)
- 46 patients à risque dépourvus d'escarre (77%) ; 14 patients porteurs d'une escarre (23%)
- 14 escarres : 9 stades 1 (65%) et 5 stades 2-3 (35%)
- Localisations : 14 sacrum (100%)
- 27 douleurs de siège (45%)
- Temps quotidien de prévention/traitement des escarres : 47 patients < 1 h, 12 patients de 1 à 2 h, 1 patient > 2 h


RESULTATS

■ CRITERE PRINCIPAL : préservation ou amélioration de l'état cutané

✓ Diminution de **36%** du nombre d'escarres sacrées

- Score de Waterlow moyen : 18.8 ± 6.5 (8 ; 37)
- **3 patients sans risque sans escarre (5%)**, 48 à risque sans escarre (80%), 9 porteurs d'escarre (15%)
- **9 Escarres** : 6 stades 1 (67%), 3 stades 2-4 (33%)
- **10 douleurs de siège** (17%)
- **Gain de temps soignant** d'aide à la prévention/traitement des escarres

■ CRITERE SECONDAIRE : appréciations

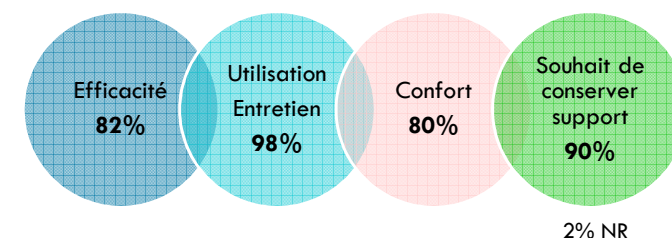

CLINIQUE

COUSSINS EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE

ALOVA[®] ERGONOMIQUE

METHODE

- Etude observationnelle, prospective, multicentrique avec analyse descriptive
- Etude menée en **1999** en établissement de santé ; 2 suivis à J0 et J15
- **60** patients pluri pathologiques principalement neurologiques et traumatologiques
- Âge moyen 76,5 ans ; sex-ratio F/H 1,5 ; poids moyen 59,9 kg ; taille moyenne : 1,64 m
- Ancienneté moyenne des patients dans le service : 2,9 mois (0 ; 44)
- Score de Waterlow initial moyen : 21.1 ± 5.6 (10 ; 33)
- 45 patients à risque dépourvu d'escarre (75%) ; 15 patients porteurs d'une escarre (25%)
- 15 escarres : 9 stades 1 (60%) et 6 stades 2-3 (40%)
- Localisations : 11 sacrum (73%), 2 fesses (13%), 1 ischions (7%), 1 trochanter (7%)
- 29 douleurs de siège (48%) : 22 intensité faible, 4 moyenne, 3 intense
- Temps quotidien de prévention/traitement des escarres : 48 patients < 1 h, 11 patients de 1 à 2 h, 1 patient > 2 h

RESULTATS

■ CRITERE PRINCIPAL : préservation ou amélioration de l'état cutané

✓ Diminution de **40%** du nombre d'escarres

- Score de Waterlow moyen : 19.9 ± 6 (6 ; 32)
- **2 patients sans risque (3%)**, 49 à risque d'escarre (82%), 9 porteurs d'escarre (15%)
- **9 Escarres** : 5 stades 1 (56%), 4 stades 2-3 (44%)
- **4 douleurs de siège (7%)** : 2 d'intensité faible, 1 moyenne, 1 intense
- **Gain de temps soignant d'aide** à la prévention/traitement des escarres

■ CRITERE SECONDAIRE : appréciations

