

# DISPOSITIVOS DE CONTENCIÓN Y SUJECCIÓN DE LAS PERSONAS A CAMA

Los dispositivos de contención a la cama WINN'SAVE® suministrados por prescripción médica, han sido especialmente diseñados para restringir la libertad de movimiento de las personas con las facultades psiquiátricas alteradas, para prevenir y evitar el riesgo de caída, limitar los periodos de deambulación o permitir la administración de un cuidado.

- **Eficacia:** Diseño evolutivo según el nivel de protección necesario.  
Material textil tranquilizante gracias a la suavidad al tacto.  
Uso facilitado por marcaciones integradas.  
Refuerzo de las costuras sometidas a las tracciones.  
Durabilidad de los materiales (hebillas y ollaos de acero inoxidable)
- **Seguridad:** Textil con un tratamiento retardante al fuego.  
Compatibilidad con una desinfección térmica y química.  
Tres sistemas de cierre según necesidad: magnético, mecánico o sujeción con hebilla.



## Contención y sujeción a la cama

### • Fijación abdominal + sujeción pélvica

Indicación: agitación media con riesgo de caída.

Propiedades: contención de la persona que guarda cama. Permite mover los brazos, las piernas, sentarse y darse la vuelta. Gracias a la sujeción pélvica, el paciente no podrá deslizarse hacia abajo.

Consejos de utilización: fijar a las partes fijas de la cama.

Medir el contorno de la cintura antes de pedir el producto.

Composición: poliéster. Tratamiento retardante al fuego.

Recomendación: la contención debe ser objeto de prescripción médica y su beneficio reevaluado en 24 horas.

### • Fijación de 2 muñecas (fijación en el cinturón abdominal)

Indicación: agitación severa con riesgo de caída. Agitación y/o agresividad física no controlable.

Propiedades: contención de la persona que guarda cama por fijación de las muñecas, con posibilidad de ajustar la longitud para reducir la amplitud de los movimientos del brazo.

Consejos de utilización: la fijación de las muñecas se utiliza como complemento a la fijación abdominal con sujeción pélvica. Se fija en el cinturón abdominal.

Talla única. Composición: poliéster. Tratamiento retardante al fuego.

Recomendación: la contención debe ser objeto de prescripción médica y su beneficio reevaluado en 24 horas.

### • Enganche de 2 muñecas a las partes fijas de la cama

Indicación: agitación severa con riesgo de caída. Agitación y/o agresividad física no controlable.

Propiedades: contención de la persona que guarda cama por fijación de las muñecas, con posibilidad de ajustar la longitud para reducir la amplitud de los movimientos del brazo.

Consejos de utilización: fijar las muñecas a las partes fijas de la cama.

Talla única. Composición: poliéster. Tratamiento retardante al fuego.

Recomendación: la contención debe ser objeto de prescripción médica y su beneficio reevaluado en 24 horas.

### • Fijación de hombros y tórax

Indicación: agitación media con riesgo de caída.

Propiedades: contención de la persona que guarda cama.

Consejos de utilización: la fijación de hombros y tórax se utiliza como complemento de la fijación abdominal con sujeción pélvica.

Medir la parte hombro-tórax antes de pedir su producto.

Accesorio: extensión para enganche de hombro-tórax.

Composición: poliéster. Tratamiento retardante al fuego.

Recomendación: la contención debe ser objeto de una prescripción médica y su beneficio reevaluado en 24 horas.

### • Fijaciones universales

Indicación: agitación severa con riesgo de caída. Agitación y/o agresividad física no controlable.

Talla única. Composición: poliéster. Tratamiento retardante al fuego.

Recomendación: la contención debe ser objeto de una prescripción médica y su beneficio reevaluado en 24 horas.

CIERRE MAGNÉTICO	CIERRE MECÁNICO	HEBILLA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)
VCBTLT002-10	VCBTLT102-10	---	Contención abdominal c/pieza perineal y bloqueos laterales (S)	45-85 *
VCBTLT002-20	VCBTLT102-20	---	Contención abdominal c/pieza perineal y bloqueos laterales (M)	70-118
VCBTLT002-30	VCBTLT102-30	---	Contención abdominal c/pieza perineal y bloqueos laterales (L)	94-158
VCBTLT002-21	VCBTLT102-21	---	Contención abdominal c/pieza perineal y SIN bloqueos laterales (M)	70-118
VCBTLT002-31	VCBTLT102-31	---	Contención abdominal c/pieza perineal y SIN bloqueos laterales (L)	94-158
VCBTLT003-01	VCBTLT103-01	---	Bancada 2 tobillos a cama	---
VCBTLT004-20	VCBTLT104-20	---	Contención hombro tórax a cama	20-50
VCBTLT004-01	VCBTLT104-01	---	Extensión sujeción torácica a cama	---
VCBTLT011-00	VCBTLT111-00	---	Contención 2 muñecas talla única (x2)	10-30
VCBTLT006-00	VCBTLT106-00	---	Contención sujeción universal muñecas y tobillos (x2)	5-40 **
VCBTLT013-01		---	Accesorio - pieza perineal de recambio (sin cierres)	---
---	---	VCBTLT010-20	Sujeción abdominal (M)	65-85
---	---	VCBTLT010-30	Sujeción abdominal (L)	85-120
---	---	VCBTLT007-00	Sujeción universal muñecas y tobillos	5-40 **



\* Medida correspondiente al contorno de la cintura  
\*\* Medida correspondiente al contorno del tobillo y/o de la muñeca

Garantía de 2 años\*  
\* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.

Nota: Los cierres no deben sumergirse en ningún líquido y deben reemplazarse a los 3 años.

Mantenimiento:

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel.: +34 9 61 56 55 21 – Fax: +34 9 61 56 03 83 – E-mail: ventas@winnCare.es

www.winnCare.es

Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

